

Cavilon®
Es tiempo de prevenir. Es tiempo de Cavilon



Película Protectora Sin Alcohol Cavilon®

- Película protectora sin alcohol, que no produce ardor. Es líquida, transparente y transpirable. Forma una barrera de protección contra adhesivos, humedad y fluidos corporales hasta por 72 hrs.

CARACTERÍSTICAS

La Película Protectora Sin Alcohol Cavilon® es un excepcional protector barrera para la piel, de larga duración con amplio respaldo científico.

Su mecanismo de acción se debe a su alta afinidad a la epidermis, gracias a la cual, forma una película PROTECTORA que previene daño de la piel producido por adhesivos, roce o fricción y humedad proveniente de fluidos corporales como orina, heces, saliva, exudado heridas, etc.

La Película Protectora Sin Alcohol Cavilon® tiene 4 componentes esenciales:

- Terpolimero de acrilato: componente principal; material formador de película.
- Polifenilmetilsiloxano: plastificante.
- Hexametildisiloxano y Issooctano: solvente a base de silicona no irritante y de rápida evaporación.

Este producto no contiene principios activos que dañen la piel, es libre de látex y es esterilizado en rayos gamma.

BENEFICIOS

La Película Protectora Sin Alcohol Cavilon® de 3M se puede utilizar sobre piel dañada o intacta.

No interfiere con el proceso de cicatrización de heridas o úlceras.

Permite proteger la piel de su paciente frente a múltiples riesgos como lesiones por adhesivos, roce o fricción y humedad proveniente de fluidos corporales como orina, heces, saliva, exudado heridas, etc.

Su presentación en sachet estéril es de especial utilidad en la protección de lugares donde se requiere mantener la esterilidad.

Ahorra tiempo y dinero, ya que no se sale con exudado o líquidos y no requiere ser removida para la siguiente aplicación.

VENTAJAS

Única película que permite aplicaciones sin ardor porque no contiene alcohol, en presentación frasco spray y sachet estéril.

Se seca rápidamente (30 segundos).

Brinda protección cutánea contra fluidos corporales y adhesivos médicos hasta por 72 hrs. continuas.

No es citotóxica y puede interactuar con heridas sin interferir en su proceso de cicatrización.

Mayor versatilidad que otras películas: se puede usar en múltiples indicaciones clínicas, como protección contra adhesivos médicos, fluidos corporales (orina, deposiciones, secreción de fistulas, secreción de heridas, etc.) y humedad.



3M

Un excepcional protector barrera para la piel.

Instrucciones de aplicación

1. Limpie la zona afectada con un limpiador cutáneo de pH neutro o con agua y jabón. Si usa jabón, enjuague muy bien con agua tibia y seque sin restregar.
2. Aplique una capa uniforme de la Película Protectora Sin Alcohol Cavilon®. Deje secar por completo. Puede aplicar una segunda capa si lo desea, pero no exceda las dos capas. Para mejores resultados con el frasco rociador, sosténgalo a 10 ó 12 cm de la piel.
3. Si lo aplica sobre pliegues cutáneos, sosténgalos hasta que el producto seque completamente.



Usos médicos específicos

USOS ESPECÍFICOS	TÉCNICAS DE APLICACIÓN
Protección del área perineal contra la orina y las heces (incontinencia).	Aplique a partir de la zona anal y avance hacia afuera sobre los glúteos o la zona de exposición. Para mejores resultados use el frasco rociador.
Protección de la piel periestomal contra la orina, heces o adhesivos.	Comience a aplicar en la piel cercana a la base del estoma y avance hacia fuera hasta abarcar toda la piel que debe ser cubierta con cinta o adhesivo para ostomías. Para mejores resultados use el frasco rociador o el hisopo de 1 ml.
Protección de la piel alrededor de heridas quirúrgicas producto de humedad o fricción.	Comience la aplicación en el borde de la herida y avance hacia afuera sobre la zona de exposición. Para mejores resultados use el frasco rociador o el hisopo de 1 ml.
Protección de la piel alrededor de tubos, cánulas, sondas, drenajes y otros dispositivos médicos.	Aplique a partir del sitio por donde el dispositivo médico sale de la piel, y avance hacia afuera hasta abarcar toda la zona expuesta. Para mejores resultados use el frasco rociador o el hisopo de 1 ml.
Protección de la piel contra el daño causado por los adhesivos de uso médico.	Aplique la película en la piel que queda bajo el adhesivo; es necesario reaplicar la película cada vez que cambie el producto adhesivo. Si el adhesivo es de fijación de acceso vascular, utilice la presentación en sachet estéril dejando libre el sitio de inserción del catéter.



3343E	Película Protectora Sin Alcohol Cavilon® Sachet	Hisopo 1 ml	Caja	25
3346E	Película Protectora Sin Alcohol Cavilon® Spray	Botella 28 ml	Caja	12

3M División Médica
3M Chile S.A.
Santa Isabel 1001, Providencia
Santiago

atencionconsumidor@mmm.com
Tel. 600 300 3636
www.3M.cl

Mayor información sobre este producto:
www.juntoscerrandoheridas.cl